


Principais características e benefícios

Vedação RollFit XT

Adapta-se dinamicamente para minimizar a pressão na ponte do nariz e vazamentos

Tecnologia VentiCool™

A Touca de Fixação da máscara é porosa e foi projetada para permitir a dissipação de calor e umidade

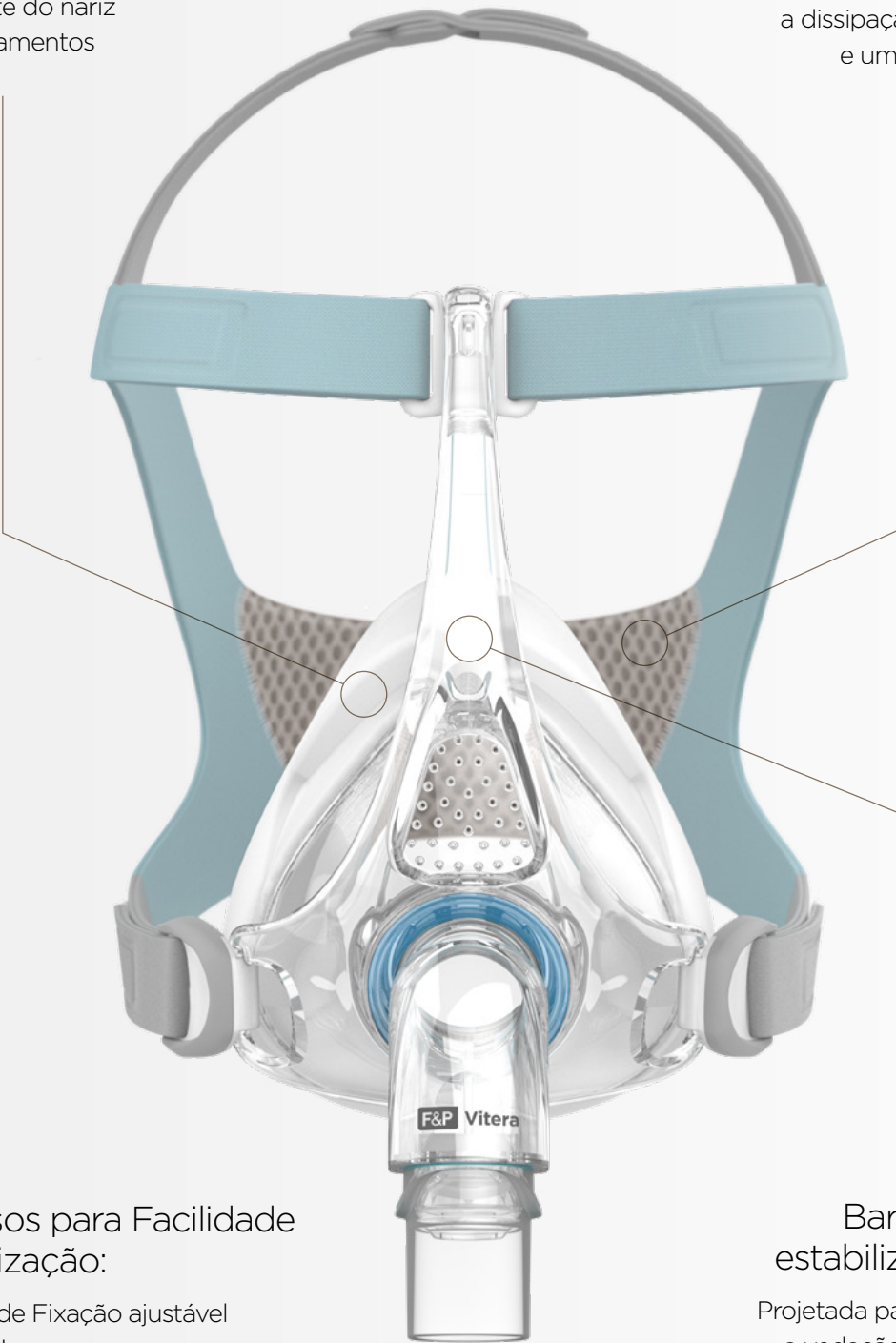

Recursos para Facilidade de Utilização:

- Touca de Fixação ajustável e presilhas
- Presilha frontal removível
- Destaques azuis VisiBlue™

Barra estabilizadora
Projetada para manter a vedação estável durante a noite

Guia de colocação



Etapa 1.
Segure a parte frontal da máscara com uma das mãos e a touca de fixação com a outra mão. Certifique-se de que a presilha da touca de fixação não esteja presa à estrutura da máscara.



Etapa 2.
Posicione a vedação sobre o rosto e coloque a touca de fixação sobre a cabeça.



Etapa 3.
Encaixe a presilha da touca de fixação à estrutura da máscara.



Etapa 4.
Ajuste cuidadosamente as tiras da touca de fixação, começando pelas tiras inferiores e seguindo para as tiras frontais azuis.

Ásia, América do Sul, Europa Oriental (Modelo Z)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
VITISZ	Máscara Facial Vitera Pequena
VITIMZ	Máscara Facial Vitera Média
VITILZ	Máscara Facial Vitera Grande
VITISSZ	Máscara Vitera Pequena/Pequena (duas vedações)*
VITIMMZ	Máscara Vitera Média/Média (duas vedações)*
VITILLZ	Máscara Vitera Grande/Grande (duas vedações)*

Peças de Reposição

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
400VIT131	Máscara Facial Vitera Pequena sem Touca de Fixação*
400VIT132	Máscara Facial Vitera Média sem Touca de Fixação*
400VIT133	Máscara Facial Vitera Grande sem Touca de Fixação*
400VIT111	Vedação Vitera Pequena
400VIT112	Vedação Vitera Média
400VIT113	Vedação Vitera Grande

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
400VIT121	Touca de Fixação Vitera Pequena
400VIT122	Touca de Fixação Vitera Média/Grande
400FPH241	Engate giratório F&P
400VIT151	Presilhas e Clipe Frontal Vitera
400VIT171	Cotovelo Vitera

*Não se encontra disponível em todos os países.

1. 39 de 41 participantes avaliaram a máscara como sendo tão ou mais estável que sua máscara habitual. Estudo de validação interna conduzido nos Estados Unidos em 2017, com 41 participantes. 2. 37 dos 41 participantes acharam a máscara suficientemente estável para dormir em sua posição preferida durante a noite. Estudo de validação interna conduzido nos Estados Unidos em 2017, com 41 participantes. 3. 38 de 41 participantes avaliaram a máscara como sendo tão ou mais confortável no rosto, quando comparada à sua máscara habitual. Estudo de validação interna conduzido nos Estados Unidos em 2017, com 41 participantes. 4. Guilleminault, C. e Bassiri, A. Características clínicas e avaliação da síndrome da apneia-hipopneia obstrutiva do sono e da síndrome da resistência das vias aéreas superiores. Polegadas: Kryger, M.H., Roth, T., e Dement, W.C. (Eds). Princípios e prática da medicina do sono. Elsevier Sanders, Philadelphia, PA, 2015; 1043-1052. 5. Estudo interno da F&P Vitera para testar a porosidade do tecido com a tecnologia VentiCool em comparação ao material das toucas de fixação das máscaras F&P Simplus™ e F&P FlexiFit™.

Vitera, RollFit, VentiCool, Simplus, FlexiFit e VisiBlue são marcas registradas da Fisher & Paykel Healthcare Limited. Para consultar informações sobre patentes, acesse www.fphcare.com/ip

Descubra mais em www.fphcare.com

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

F&P Vitera

Máscara Facial

Redefinindo o conforto.

NOVA



www.fphcare.com.br

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

Redefinindo o conforto.

O Conforto é Único. O Conforto é Pessoal. O Conforto é fundamental para o sucesso da terapia com CPAP. É por isso que acreditamos que o conforto precisa ser medido durante uma noite inteira de sono, não somente na consulta inicial.

Com tecnologias que trabalham juntas para proporcionar estabilidade, adaptabilidade e respirabilidade durante toda a noite, a F&P Vitera é uma máscara que redefine o conforto.



93%

dos pacientes avaliaram a Vitera como sendo tão ou mais estável que sua máscara habitual¹

Estável e segura, com estabilidade dinâmica.

A barra estabilizadora e a vedação RollFit™ XT oferecem estabilidade dinâmica para manter a vedação confortável e segura durante a noite.


Liberdade de movimento com o RollFit XT.

- Adapta-se dinamicamente à medida que os pacientes se movem, ajudando a manter a vedação estável durante a noite
- A suave vedação de silicone move-se para frente e para trás, minimizando a pressão no nariz
- Projetada para se ajustar a uma ampla variedade de formatos de rosto e nariz
- Formato da vedação projetado para minimizar o vazamento para a área dos olhos



88%

dos pacientes puderam dormir em sua posição preferida durante a noite²

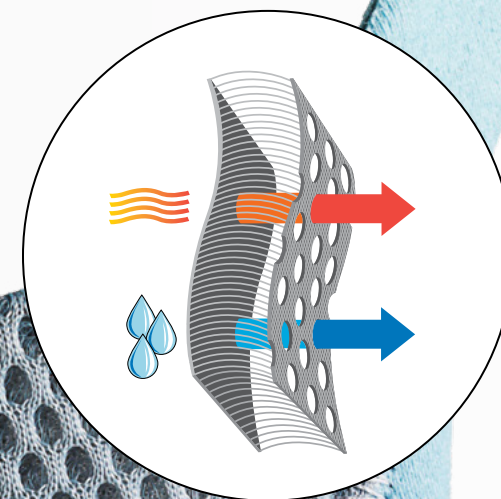

Sinta o frescor e o conforto do VentiCool.

Transpirar durante o sono é um sintoma bem conhecido dos portadores de AOS (apneia obstrutiva do sono).⁴

A Touca de Fixação Vitera possui um tecido poroso patenteado que permite maior transpiração de ar e umidade do que o material utilizado em nossa linha líder de máscaras faciais.*

A tecnologia VentiCool ajuda a manter os pacientes refrescados e confortáveis durante o sono.

90%

dos pacientes avaliaram a Vitera como sendo tão ou mais confortável no rosto quando comparada à sua máscara habitual³

* Testes internos mostraram que a Touca de Fixação com tecnologia VentiCool permite fluxo de ar 21 vezes maior e transferência de umidade 32% superior do que as utilizadas em nossas principais máscaras faciais.⁵