

A performance tem um novo estilo

Philips Respironics Wisp – máscara nasal de mínimo contato


Guia para colocação da máscara



1

Antes de colocar a máscara, desconecte os cliques do fixador de cabeça torcendo-os na direção contrária da estrutura.

Importante: Use o medidor de tamanho de máscara para escolher a parte almofadada adequada à largura do seu nariz, sem bloquear suas narinas.

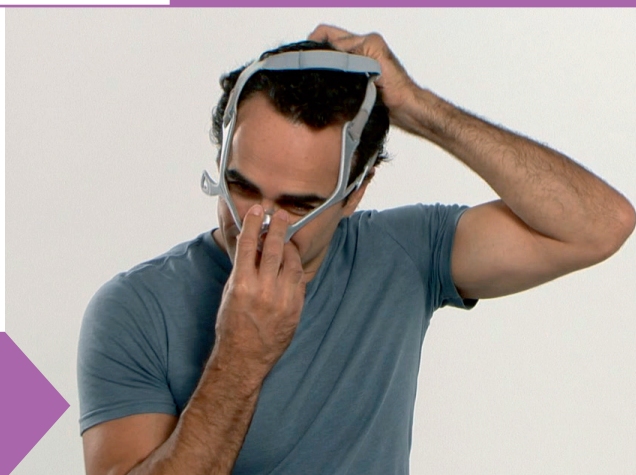

2

Segure delicadamente o almofadado sobre o nariz e puxe o fixador sobre a sua cabeça.

Observação: O fixador de cabeça deve tocar a parte de trás da sua cabeça.



3

Mantendo a máscara no lugar, reconecte os cliques empurrando-os de volta na estrutura da máscara.

Observação: Caso não queira usar os cliques, as guias do fixador de cabeça podem ser encaixadas nas ranhuras da estrutura da máscara.



4

Puxe as guias do fixador de cabeça para ajustar de maneira uniforme as correias inferiores e superiores do fixador de cabeça. A máscara deve repousar confortavelmente no seu rosto.

Importante: Não aperte excessivamente. O fixador de cabeça deve ficar folgado e confortável.



5

Também é possível reposicionar o tubo da máscara através do encaixe no próprio fixador de cabeça, antes de acoplar o tubo de CPAP.

Observação: O uso do encaixe situado no fixador de cabeça pode ajudar a tornar mais confortáveis algumas posições na cama.



6

Movimente-se em diferentes posições na cama. Encontre a posição mais confortável. Caso haja vazamento de ar excessivo, faça ajustes finais quando estiver deitado.

Observação: Um pouco de vazamento de ar é normal. Ajuste as correias superiores do fixador de cabeça para reduzir os vazamentos ao redor dos olhos.

Detalhes adicionais de colocação podem ser encontrados nas instruções que acompanham sua máscara. Um fixador maior de cabeça também está disponível, mediante solicitação.

Para mais informações, acesse www.philips.com/respironics

MM 2/14/14 MCI 4106001

PHILIPS
RESPIRONICS